

N95/FFP2 Maske Kullanımı, Takılması, Çıkarımı ve Atılması Kuralları

- 1) Maskeye dokunmadan önce, alkol bazlı bir el dezenfektanı ile el ovalayın veya sabun ve su ile ellerinizi yıkayın.
- 2) Maske kullanım öncesi üzerinde delik veya damlacık olmadığını kontrol edin.
- 3) Maskenin ip/lastikleri üst kısımda kalacak şekilde tutarak yüzünüze oturtun.
- 4) Maskenin önce üst sonra alt bağlarını başınızın arkasına geçirin.
- 5) Maskenin burun kısmını iki parmağınız ile bastırarak yüzünüze tam oturmasını sağlayın
- 6) Maskenin yüzünüze tam oturduğundan hava kaçağı olmadığından emin olun.
- 7) Maskenizi önünde sperlik ve/veya üzerinde cerrahi maske takarak kullanmışsanız doğru takma ve çıkarma kurallarına uyarak 5 kere kullanabilirsiniz . Bu durumda maskeyi taktıktan hemen sonra el hijyenini sağlayın.
- 8) Maskenizi aerosol oluşturacak bir işlem (bronkoskopi, entübasyon, ekstübasyon, aspirasyon ve üst solunum yolu numune alımı)'lerinden sonra veya vücut sıvılarıyla kirlenmiş ise veya rahat nefes alamıyorsanız tekrar kullanmayın tıbbi atığa atın.
- 9) Maskenizin dış yüzünün kirlendiğini unutmayın elinizle dış yüzüne dokunmayın. Maskenizi çıkardıktan sonra veya istemeden dış yüzüne her dokunduğunuzda el hijyeninizi sağlayın .